


<p style="text-align: center;"><b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Einschulungsprotokoll</b> der RCU Otto Wagner Spital Tel. 01/91060/41635</p>
--

<p><b>von</b></p>				
<p>Klebeetikette</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				
<p>Weitere Personen</p> <table border="1"><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr></table>				

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**Geräteerklärung**

- Frontansicht
- Ein-Ausschalter
- Einstellparameter (nur für ärztliches Personal)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**Geräteerklärung**

- Ein-Ausschalter
- Kontrolllampen ob Netz od. Batteriebetrieb
- Technischer Alarm (sofort Fa. Verständigen)
- Diskonnektionsalarm
- Rampe

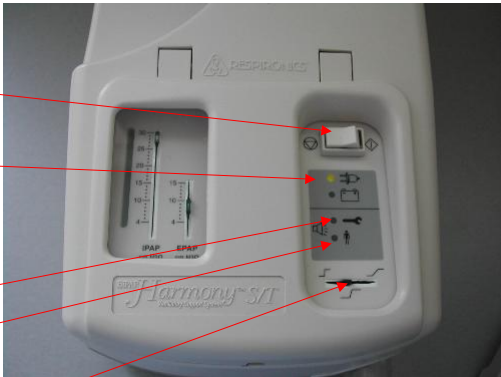


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**Geräteerklärung**

- Rückansicht
- Netzstecker
- Verschlusskappe für Filter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**Filterwechsel**

- **Verschlusskappe entfernen**
- Filter schwarz kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen
- weißen Filter nach 30 Tagen wechseln




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**Filterwechsel**

- Verschlusskappe entfernen
- **Filter schwarz kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen**
- weißen Filter nach 30 Tagen wechseln




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**


**Filterwechsel**


- Verschlusskappe entfernen
- Filter schwarz kontrollieren und bei Bedarf waschen und trocknen
- **weißen Filter nach 30 Tagen wechseln**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gerät an Netz anschließen</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						
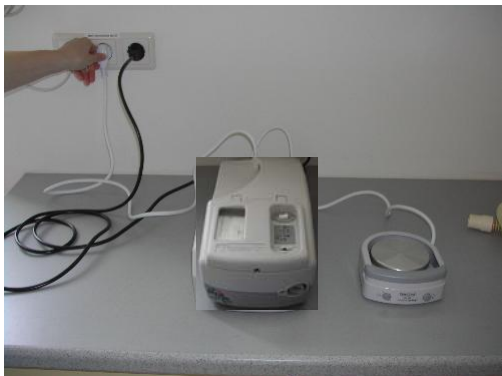
<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>2. Heizung vorbereiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Heizung ans Netz (Steckdose) schließen</b></li> <li>• durch hinunterdrücken der Abdeckung.....</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizung ans Netz (Steckdose) schließen</li> <li>• <b>durch hinunterdrücken der Abdeckung.....</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>.....den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen</b></li> <li>• destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....</li> <li>• ....bis zur schwarzen Markierung</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**2.**

- .....den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- **destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....**
- ....bis zur schwarzen Markierung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**2.**

- .....den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
- ....bis zur schwarzen Markierung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**3. Zusammenbau**

- **Sicherheitsventil anstecken**
- Kurzer Schlauch anstecken (vom Beatmungsgerät zur Heizung)



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden





Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!


Sauerstoff aufdrehen!


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>3. Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsventil anstecken</li> <li>• <b>Kurzer Schlauch anstecken (vom Beatmungsgerät zur Heizung)</b></li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>3. Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Langer Schlauch von der Heizung zur Maske</b></li> <li>• Maske an den langen Schlauch anstecken</li> <li>• Gerät ist Einsatzbereit</li> <li>• Ein-Ausschalter betätigen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>3. Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langer Schlauch von der Heizung zur Maske</li> <li>• <b>Maske an den langen Schlauch anstecken</b></li> <li>• Gerät ist Einsatzbereit</li> <li>• Ein-Ausschalter betätigen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>						
<p><b>3. Zusammenbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langer Schlauch von der Heizung zur Maske</li> <li>• Maske an den langen Schlauch anstecken</li> <li>• <b>Gerät ist Einsatzbereit</b></li> <li>• Ein-Ausschalter betätigen</li> </ul>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

**3. Zusammenbau**

- Langer Schlauch von der Heizung zur Maske
- Maske an den langen Schlauch anstecken
- Gerät ist Einsatzbereit
- **Ein-Ausschalter betätigen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät „Harmony / ST“ & Heizung**

<b>ALARM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>BEHEBUNG</b>
<b>Diskonnektionsalarm</b>	PatientIn ist nicht korrekt angeschlossen Es gibt irgendwo im Schlauchsystem ein Loch Maske undicht	PatientIn anschließen Alle Schläuche überprüfen Schläuche unverzüglich wechseln Maske korrigieren
<b>Technischer Alarm</b>	Maschine defekt	Sofort Firma benachrichtigen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

<b>Beatmungsgerät „Harmony / ST“ &amp; Heizung</b>
<p>Wurde auf diese Pflgetätigkeiten eingeschult:</p> <p style="text-align: center;">Unterschrift:..... (Name in Blockschrift)</p> <p>erfolgreicher Abschluss der Einschulung:</p> <p style="text-align: center;">Unterschrift Sr/Pfl.:..... (Name in Blockschrift)</p>