

# Beatmungsgerät „SOMNOcomfort 2e“ & Heizung“

## Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital


Tel. 01/91060/41635

**von**

Klebeetikette

--


Weitere Personen


**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 


**Geräteerklärung**

**Frontansicht**

- Display
- Taste-Ein-Aus-Gerät
- Rampentaste
- Befeuchter „Ein“ (Stufe 1-6)
- Ansatz für Schlauch Adapter

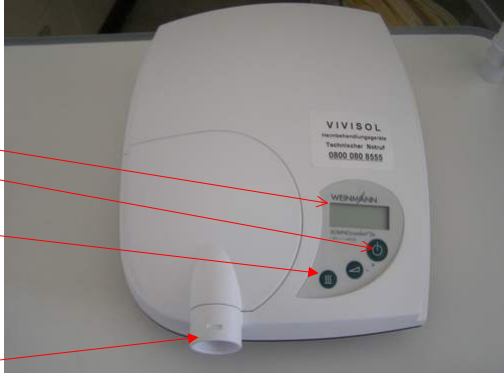


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung**

**Rückansicht**

- Filterkassette (zum abnehmen)
- Netzanschluss




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung

#### Geräteerklärung

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil
  
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung

#### Filterwechsel

- Öffnen Sie die Filterabdeckung (nach oben ziehen)
- Entnehmen Sie die beiden Filter  
 Grobfilter + Feinfilter  
 weiß => auswechseln  
 schwarz => reinigen

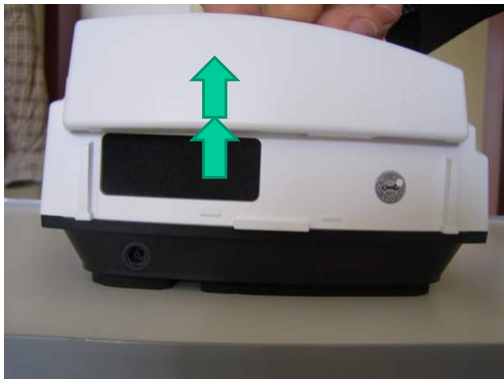

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung

#### Filterwechsel

- Öffnen Sie die Filterabdeckung (nach oben ziehen)
- Entnehmen Sie die beiden Filter  
**Grobfilter + Feinfilter**  
 weiß => auswechseln  
 schwarz => reinigen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung

#### Filterwechsel

1. weißer Filter
2. schwarzer Filter
3. Abdeckung schließen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung - Heizung**

- Schutzabdeckung entfernen
- Ansätze für Heizung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung – Heizung**

- **Sicherheitsstift entfernen**
- Befeuchtertopf einrasten lassen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung – Heizung**

- Sicherheitsstift entfernen
- **Befeuchtertopf einrasten lassen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung – Heizung**


**Merke!**

**Wasserbefüllung nie direkt am Gerät durchführen**

- **Wasserbehälter entfernen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung – Heizung**


**Merke!**

**Wasserbefüllung nie direkt am Gerät durchführen**

- Einfüllklappe öffnen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung** 

**Geräteerklärung – Heizung**

**Merke!**

**Wasserbefüllung nie direkt am Gerät durchführen**

- Steriles Wasser einfüllen ( aus der Apotheke )



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



#### Geräteerklärung – Zusammenbau

- **Befeuchtertopf ein-schieben bis er ein-rastet**
- Schlauchadapter anbringen
- Beatmungsschlauch anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



#### Geräteerklärung – Zusammenbau

- Befeuchtertopf ein-schieben bis er ein-rastet
- **Schlauchadapter anbringen**
- Beatmungsschlauch anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



**Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!**

**Sauerstoff aufdrehen!**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



#### Geräteerklärung – Zusammenbau

- Befeuchtertopf einschieben bis er einrastet
- Schlauchadapter anbringen
- **Beatmungsschlauch anbringen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**



**Geräteerklärung –  
 Zusammenbau**

- Ausatemventil bei Bedarf anbringen (wenn nicht auf Maske vorhanden)
- Maske am Beatmungsschlauch anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**



**Ihr Gerät ist nun  
 einsatzbereit**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

## Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



### Gerätbetrieb

„Ein-Aus“  
 Schalter betätigen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

## Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



### Heizungsbetrieb

„Ein“  
 Schalter betätigen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**



**Heizungsbetrieb**

**Heizstufe einstellen:**

- Befeuchter „Ein“ Taste ca. 3 sek. gedrückt halten, Symbol beginnt zu blinken
- Wählen der Heizstufe (1-6) mit +/- Taste



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**

**Alarmfunktionen entnehmen Sie bitte Ihrer beiliegenden Gebrauchsanweisung.**

**Bei etwaigen Fragen und Problemen zu Hause wenden Sie sich umgehend an die Firma Vivisol.**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung des Befeuchters**

**Achtung:**

- **Vor der Reinigung immer roten Verschlussstopfen ansetzen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung des Befeuchters**

- **täglich**
- **öffnen sie den Befeuchter**
- **reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung (Geschirrspüler tauglich)**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung des Befeuchters**

- **täglich**
- öffnen Sie den Befeuchter
- **reinigen Sie die Kammer mittels Seifenlösung (Geschirrspüler tauglich)**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung des Befeuchters**

- **täglich**
- **spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus**
- **trocknen Sie die Kammer anschließend gut ab**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



#### Reinigung des Befeuchters

- **täglich**
- spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus
- **trocknen Sie die Kammer anschließend gut ab**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

### Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



#### Reinigung der Schläuche

- **2mal wöchentlich**
- spülen Sie den Beatmungs-Schlauch innen und außen mit Seifenlösung gut durch



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung der  
Schläuche**

- 2mal wöchentlich
- spülen Sie den Beatmungs-Schlauch innen und außen mit Seifenlösung gut durch



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung



**Reinigung der  
Schläuche**

**Achtung:**

- lassen Sie den Schlauch gut austrocknen bevor Sie Ihr Beatmungsgerät wieder verwenden



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**



**Reinigung der  
Schläuche**

- Zum besseren Austrocknen können Sie auch Ihr integriertes Trocknungsprogramm des SOMNOcomfort nutzen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**

- Abspülen und Trocknen des Sauerstoff-Adapters



**2 mal pro Woche**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**

**Werter PatientIn,**

**Sie haben einmal im Jahr Anspruch auf eine neue Beatmungsmaske ebenso auf einen neuen Beatmungsschlauch.**

**Ihr Zubehör erhalten Sie mittels Verordnungsschein Ihres behandelnden Facharztes oder Hausarztes über ihre Lieferfirma.**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

**Beatmungsgerät SOMNOcomfort 2e & Heizung**

Wurde auf diese Pfl egetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)