

Beatmungsgerät „Synchrony“

Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital

Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette


--

Weitere Personen

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

Geräteerklärung

- Frontansicht
- Ein-Ausschalter
- Menütaste
- Netzbetrieb
- Batteriebetrieb
- Alarmtaste




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

Geräteerklärung

- Rückansicht
- Netzstecker
- Luftfilter




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

1.

- **Netzstecker am Gerät anstecken**
- Netzstecker an der Steckdose anstecken




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

1.

- Netzstecker am Gerät anstecken
- **Netzstecker an der Steckdose anstecken**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

Filterwechsel

- Abdeckkappe durch drücken an der Oberseite abnehmen
- schwarzer Filter entfernen (abwaschbar)




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

Filterwechsel

- Abdeckkappe durch drücken an der Oberseite abnehmen
- schwarzer Filter entfernen (abwaschbar)



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung						
<p style="color: blue; margin: 0;">Filterwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • weißer Filter kontrollieren und bei Bedarf wechseln (Einmalprodukt) 						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung						
<p style="color: blue; margin: 0;">Filterwechsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach Kontrolle der Filter, diese wieder ins Gerät einschieben und mit Deckel verschließen <p style="color: red; margin: 5px 0;">Achtung</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarzer Filter liegt auf weißem Filter 						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

- **Heizung vorbereiten**
- Heizung ans Netz (Steckdose) schließen
- durch hinunterdrücken der Abdeckung.....




Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

- Heizung vorbereiten
- **Heizung ans Netz (Steckdose) schließen**
- durch hinunterdrücken der Abdeckung.....

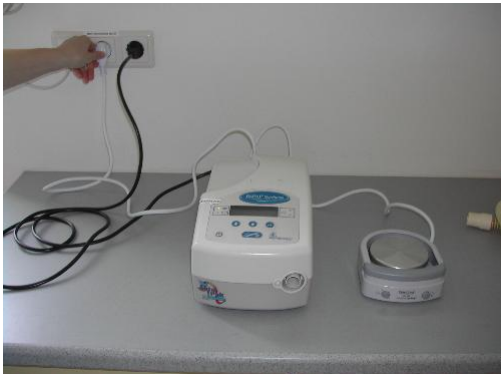

Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

- Heizung vorbereiten
- Heizung ans Netz (Steckdose) schließen
- **durch hinunterdrücken der Abdeckung.....**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

- **.....den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen**
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

-den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- **destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....**
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

2.

-den Wasserbehälter einführen und einrasten lassen
- destilliertes Wasser einfüllen (Apotheke).....
-bis zur schwarzen Markierung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

3.

- **Sicherheitsventil anbringen**
- Sauerstoffadapter an das Sicherheitsventil anbringen
- kurzer Beatmungsschlauch vom Gerät zur Heizung anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

3.

- Sicherheitsventil anbringen
- **Sauerstoffadapter an das Sicherheitsventil anbringen**
- kurzer Beatmungsschlauch vom Gerät zur Heizung anbringen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

3.

- Sicherheitventil anbringen
- Sauerstoffadapter an das Sicherheitsventil anbringen
- **kurzer Beatmungsschlauch vom Gerät zur Heizung anbringen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

3.

- **Kurzer Beatmungsschlauch vom Sauerstoffadapter...**
- ...zum Wasserbehälter



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

3.

- Kurzer Beatmungsschlauch vom Sauerstoffadapter...
- ...zum Wasserbehälter



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung


3.

- Langer Beatmungsschlauch am Wasserbehälter anbringen
- am anderen Ende muss das Ausatemventil angebracht werden



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung						
<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langer Beatmungsschlauch am Wasserbehälter anbringen • am anderen Ende muss das Ausatemventil angebracht werden 						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung						
<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maske am Ausatemventil anbringen und den Patienten od. Patientin anschliessen 						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

4.

- **Gerät ist Einsatzbereit mit Ein-Ausschalter
 Gerät in Betrieb nehmen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

ALARM	URSACHE	BEHEBUNG
Apnoe (wenn eingestellt)	PatientIn setzt mit Atmung aus	Bei einsetzen der Eigenatmung erlischt Alarm
AMV UG	PatientIn atmet zu wenig Schlauch nicht korrekt angeschlossen Maske oder Schläuche undicht	Atemfrequenz steigern Kontrolle des Schlauchsystems Maske neu positionieren
Druckschlauch abgetrennt	Maske oder Schläuche undicht Therapie beendet	Kontrolle des Schlauchsystems Maske neu positionieren Gerät ausschalten

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät „Synchrony“ & Heizung

Wurde auf diese Pflgetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)