

Beatmungsgerät „VENTImotion“

Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital

Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette

--

Weitere Personen

Beatmungsgerät „VENTImotion

Geräteansicht
Frontansicht

- Ein/Aus Taste
- Display
- Menü Taste
- Rampen Taste
- Heizungs Taste
- Enter Taste

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Geräteansicht
Seitenansicht

- EDV Anschluss
- Sauerstoffventil - Anschluss

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion“

Geräteansicht

Rückansicht

- Netzstecker
- Filterklappe

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion“

Filterwechsel

- **öffnen Sie die Klappe**
- entnehmen sie die Filterkassette
- reinigen Sie den Grobfilter (schwarz)
- setzen Sie eine neue Filterkassette ein

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion




Filterwechsel

- öffnen Sie die Klappe
- **entnehmen sie die Filterkassette**
- reinigen Sie den Grobfilter (schwarz)
- setzen Sie eine neue Filterkassette ein




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Filterwechsel

- öffnen Sie die Klappe
- entnehmen sie die Filterkassette
- **reinigen Sie den Grobfilter (schwarz)**
- setzen Sie eine neue Filterkassette ein

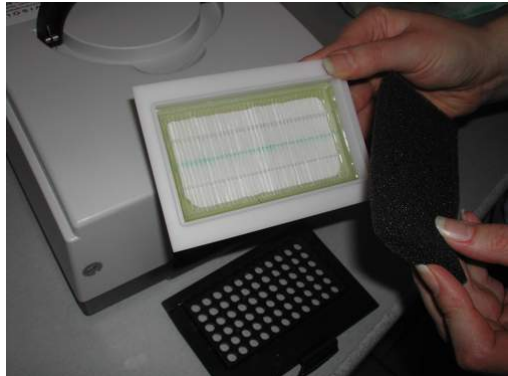


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Filterwechsel

- öffnen Sie die Klappe
- entnehmen sie die Filterkassette
- reinigen Sie den Grobfilter (schwarz)
- **setzen Sie eine neue Filterkassette ein**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Merke:

Wechseln Sie Ihren Filter sobald auf Ihrem Display die Meldung „**Bitte Filterwechsel durchführen**“ erscheint!




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- **öffnen Sie den Befeuchter**
- entfernen Sie den Heizstab beim Reinigen durch herausdrehen
- schließen Sie den Befeuchtertopf wieder





Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- öffnen Sie den Befeuchter
- **entfernen Sie den Heizstab beim Reinigen durch herausdrehen**
- schließen Sie den Befeuchtertopf wieder

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- öffnen Sie den Befeuchter
- entfernen Sie den Heizstab beim Reinigen durch herausdrehen
- **schließen Sie den Befeuchtertopf wieder**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- Achten Sie beim Verschließen auf die Markierungen am Topf bzw. Deckel

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- befüllen Sie den Topf mit sterilem, destilliertem Wasser....
- bis zur angezeigten Markierung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Befeuchter

- befüllen Sie den Topf mit sterilem, destilliertem Wasser....
- bis zur angezeigten Markierung




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

**Geräte
Zusammenbau**

- **Netzstecker anschließen**
- Befeuchter an das Gerät anstecken
- Schlauch an den Befeuchter anklicken

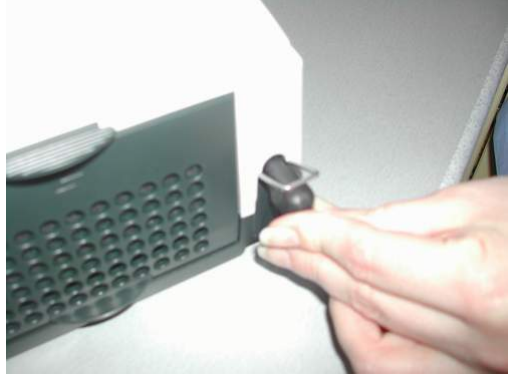

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

**Geräte
Zusammenbau**

- Netzstecker anschließen
- **Befeuchter an das Gerät anstecken**
- Schlauch an den Befeuchter anklicken



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Geräte Zusammenbau

- Netzstecker anschließen
- Befeuchter an das Gerät anstecken
- **Schlauch an den Befeuchter anklicken**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Geräte Zusammenbau

- **Beatmungsmaske an den Schlauch anschließen**
- Ihr Gerät ist nun einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

**Geräte
Zusammenbau**

- Beatmungsmaske an den Schlauch anschließen
- **Ihr Gerät ist nun einsatzbereit**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Sauerstoffventil

- **Sollten Sie Sauerstoff benötigen**
- nehmen Sie den Adapter und stecken Sie ihn seitlich an



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion“

Sauerstoffventil

- Sollten Sie Sauerstoff benötigen
- **nehmen Sie den Adapter und stecken Sie ihn seitlich an**

Max. 4 L / min

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion“

Sauerstoffventil

- **schließen sie den Sauerstoffschlauch an das Ventil an**
- verbinden Sie nun das Ventil mit Ihrer Sauerstoffquelle (Tank, Flasche,...)

max. 4 L / min möglich

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Sauerstoffventil

- schließen sie den Sauerstoffschlauch an das Ventil
- **verbinden Sie nun das Ventil mit Ihrer Sauerstoffquelle (Tank, Flasche,...)**



max. 4 L / min möglich

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Achtung!!!

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



Wenn Sie über 4L/min Sauerstoff haben!!!


Sauerstoff aufdrehen!

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Schlauches

Merke:
 verschließen Sie die Mess-Schläuche an beiden Enden immer mittels der Verschluss-Stopfen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Befeuchters

- öffnen sie den Befeuchter
- entfernen sie den Heizstab
- reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Befeuchters

- öffnen sie den Befeuchter
- **entfernen sie den Heizstab**
- reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Befeuchters

- öffnen sie den Befeuchter
- entfernen sie den Heizstab
- **reinigen sie die Kammer mittels Seifenlösung**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Befeuchters

- spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus
- trocknen sie die Kammer anschließend gut ab




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung des Befeuchters

- spülen Sie die Kammer mit klarem Wasser aus
- trocknen sie die Kammer anschließend gut ab



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Reinigung des Schlauches

Merke:
 verschließen Sie die Mess-Schläuche an beiden Enden immer mittels der Verschluss-Stopfen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion



Reinigung des Schlauches

Merke:
 verschließen Sie die Mess-Schläuche an beiden Enden immer mittels der Verschluss-Stopfen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung der Schläuche

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche innen und außen mit Seifenlösung gut durch




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Reinigung der Schläuche

- spülen Sie die Beatmungs-Schläuche anschließend unter fließendem Wasser innen und außen gut durch




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs - vorgang

- **schalten sie ihr Gerät ein**
- wählen sie in ihrem Patientenmenü...
- den Modus „Trocknungs – vorgang“




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs - vorgang

- schalten sie ihr Gerät ein
- **wählen sie in ihrem Patientenmenü...**
- den Modus „Trocknungs – vorgang“




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs - vorgang

- schalten sie ihr Gerät ein
- wählen sie in ihrem Patientenmenü...
- **den Modus „Trocknungs – vorgang“**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs – vorgang

- **bestätigen Sie den Vorgang mittels drücken der Enter Taste**
- auf Ihrem Display erscheint „Trocknungs- vorgang aktiv“

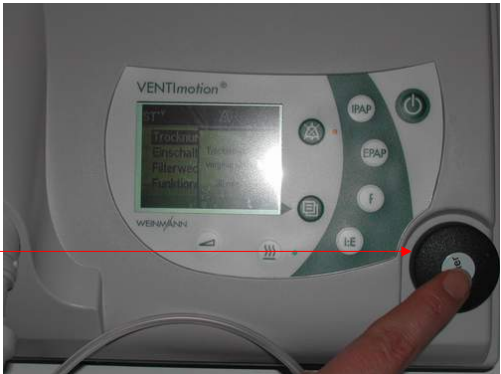


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs – vorgang

- bestätigen Sie den Vorgang mittels drücken der Enter Taste
- auf Ihrem Display erscheint „Trocknungs- vorgang aktiv“




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VENTImotion

Trocknungs – vorgang

Merke:

- Der Vorgang dauert ca. 30 Minuten
- Ihr Gerät schaltet danach automatisch ab

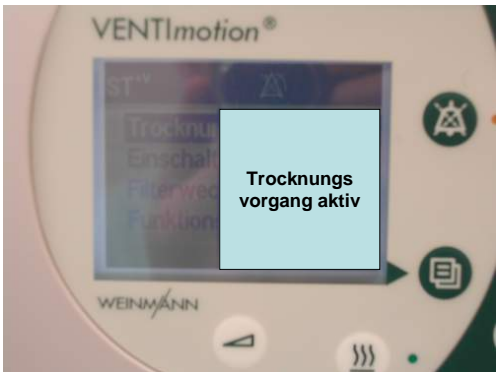

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

AKKU-Test des Beatmungsgerätes

Seriennummer:..... Beatmungsgerät **1.**

Datum:	Testbeginn: Uhrzeit	Voralarm: Uhrzeit
Anmerkungen:		
AKKU: leer	Uhrzeit:	
Anmerkungen:		

AKKU-Test des Beatmungsgerätes

Seriennummer:..... Beatmungsgerät **2.**

Datum:	Testbeginn: Uhrzeit	Voralarm: Uhrzeit
Anmerkungen:		
AKKU: leer	Uhrzeit:	
Anmerkungen:		

Beatmungsgerät „VENTImotion



Wurde auf diese Pfl ege t ä t i g k e i t e n e i n g e s c h u l t:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)