

Beatmungsgerät „VPAP III“

Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital

Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette

--

Weitere Personen

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

Geräteerklärung

- Frontansicht
- Display
- Menütasten
- Befeuchterkammer
- Temperaturregler

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

Geräteerklärung


- Rückansicht
- Luftfilter
- Ein-Ausschalter
- Netzstecker
- Schnittstelle für Firma

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

1.

- **Netzanschluss anbringen**
- **Ein-Ausschalter betätigen**
 I = Ein; O = Aus
- **Befeuchtertopf abnehmen (ziehen)**

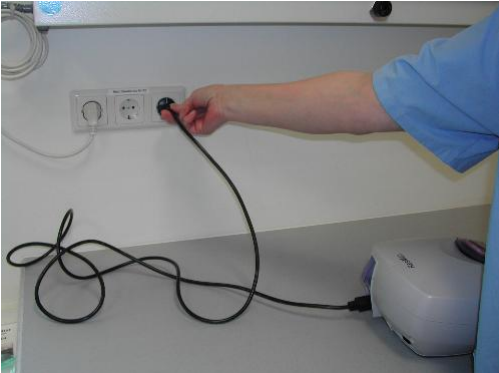


Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

1.

- **Netzanschluss anbringen**
- **Ein-Ausschalter betätigen**
 I = Ein; O = Aus
- **Befeuchtertopf abnehmen (ziehen)**



Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

4.

- **Überprüfen des Filters**
 (Kappe hochziehen und bei Bedarf Filter wechseln)

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

1.


- Netzanschluss anbringen
- Ein-Ausschalter betätigen
 I = Ein; O = Aus
- **Befeuchtertopf abnehmen (ziehen)**

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.

- **Schnappverschlüsse öffnen**
- Deckel aufklappen
- Steriles Wasser aus der Apotheke einfüllen
- max. bis zur Begrenzungslinie
- Deckel schließen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.

- Schnappverschlüsse öffnen
- **Deckel aufklappen**
- Steriles Wasser aus der Apotheke einfüllen
- max. bis zur Begrenzungslinie
- Deckel schließen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.

- Schnappverschlüsse öffnen
- Deckel aufklappen
- **Steriles Wasser aus der Apotheke einfüllen**
- max. bis zur Begrenzungslinie
- Deckel schließen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.


- Schnappverschlüsse öffnen
- Deckel aufklappen
- Steriles Wasser aus der Apotheke einfüllen
- **max. bis zur Begrenzungslinie**
- Deckel schließen

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.

- Schnappverschlüsse öffnen
- Deckel aufklappen
- Steriles Wasser aus der Apotheke einfüllen
- max. bis zur Begrenzungslinie
- **Deckel schließen**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

2.

- **Befeuchtertopf wieder an das Gerät stecken (einrasten)**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

3.Reinigung

Achtung:


- **reinigen Sie die Befeuchterkammer täglich mit Seifenlösung**
- **trocknen Sie die Kammer anschließend gut aus**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

- Sauerstoffadapter an Sauerstoffrückschlagventil anbringen
- Sauerstoffschlauch mit dem Adapter verbinden



Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff haben!!!

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

6.

- **Beatmungsschlauch an das Gerät anbringen mit Sauerstoffadapter**
- Beatmungsschlauch an das Gerät anbringen ohne Sauerstoffadapter


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

6.

- Beatmungsschlauch an das Gerät anbringen mit Sauerstoffadapter
- **Beatmungsschlauch an das Gerät anbringen ohne Sauerstoffadapter**


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						




Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

6.

- **Maske an Beatmungsschlauch anbringen**
- Beatmungsgerät ist fertig aufgerüstet und einsatzbereit




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

6.

- Maske an Beatmungsschlauch anbringen
- **Beatmungsgerät ist fertig aufgerüstet und einsatzbereit**




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

5.

- **Starten der Beatmung durch betätigen der Starttaste**
 (Der Hauptschalter „Ein-Aus“ muss auf I stehen!!!!!!)
- Einstellen der Atemgastemperatur




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

5.

- Starten der Beatmung durch betätigen der Starttaste
 (Der Hauptschalter „Ein-Aus“ muss auf I stehen!!!!!!)
- **Einstellen der Atemgastemperatur**

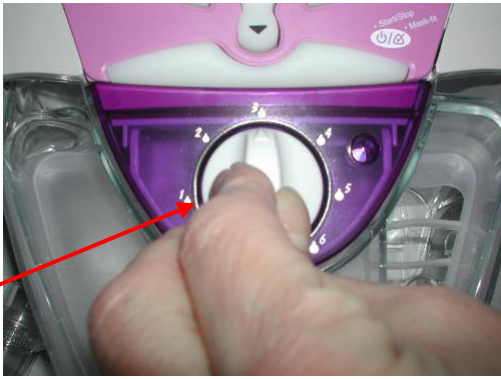


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

7. Reinigung

- **Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser**
- Bringen Sie das Wasser zum kochen
- Nehmen Sie den Topf vom Herd




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

7. Reinigung

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- **Bringen Sie das Wasser zum kochen**
- Nehmen Sie den Topf vom Herd




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

7. Reinigung

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- Bringen Sie das Wasser zum kochen
- **Nehmen Sie den Topf vom Herd**




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung


7. Reinigung


- **Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser durch**
- Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser





1 mal pro Woche


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA Das Original						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser • VORSICHT: Verbrennungsgefahr 						
1 mal pro Woche						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA Das Original						
<p>7. Reinigung</p> <p>VORSICHT: Verbrennungsgefahr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Beatmungsschläuche max. 5min. im heißen Wasser 						
1 mal pro Woche						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hängen Sie die Beatmungsschläuche zum Trocknen auf z.B über einen Wäscheständer 						
1 mal pro Woche						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus • Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife 						
2 mal pro Woche						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus • Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife 				<p>2 mal pro Woche</p>		
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus • Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife • Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus 				<p>2 mal pro Woche</p>		
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung

7. Reinigung

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche sorgfältig mit Wasser aus




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung


7. Reinigung

- Abspülen und Trocknen des Sauerstoffadapters



2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
<p>7. Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschen sie die Maske täglich mit Seifenwasser aus und wischen sie diese trocken ab 				<p>1 mal pro Tag</p>		
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						


Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung ELUNGA						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
große Leckage bei der letzten Behandlung	PatientIn ist nicht korrekt angeschlossen Es gibt irgendwo im Schlauchsystem ein Loch oder Maske sitzt korrekt	PatientIn anschließen Alle Schläuche überprüfen Maske neu positionieren				
Überprüfen Sie den Atemschlauch! Drücken sie dann eine beliebige Taste	Wasser im Schlauchsystem PatientIn ist verschleimt PatientIn hustet Schlauch geknickt	Schlauch entleeren Schlauchsystem überprüfen				
Systemfehler Kundendienst anrufen	Defektes Bauteil	Firma verständigen				
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät „VPAP III“ & Heizung



Wurde auf diese Pflgetätigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....
(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....
(Name in Blockschrift)