

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ Einschlauchsystem & Heizung

Einschulungsprotokoll

der RCU

Otto Wagner Spital

Tel. 01/91060/41635

von

Klebeetikette

--

Weitere Personen

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

Geräteerklärung

- Frontansicht
- Display
- Menütasten
- Alarm Taste
- Ein-Aus Taste




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

Geräteerklärung

- Rückansicht
- Filter
- Anschluss für externe Batterie
- Netzstecker
- Sicherung

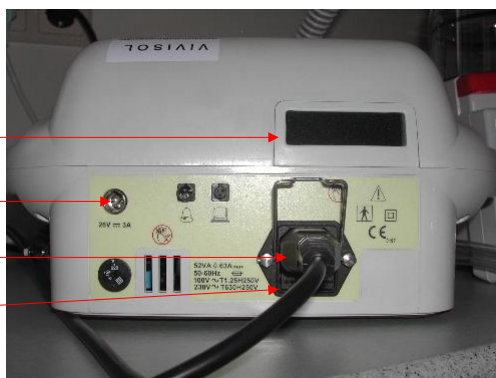

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

Geräteerklärung

- Filter einmal im Monat auf Verschmutzung kontrollieren




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

Geräteerklärung

Frontansicht

- Anschluss für Exhalation-Druckschlauch
- Anschluss für Pressure-Druckschlauch
- Schlauchanschluss

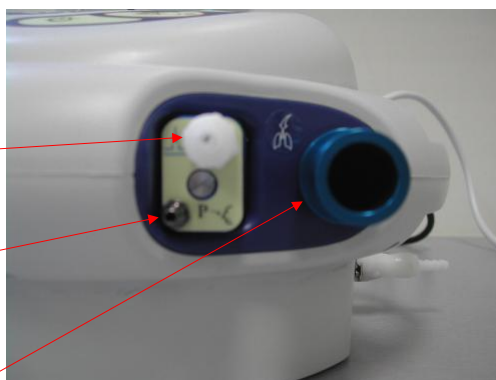

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

1. Zusammenbau

- Netzstecker am Gerät anschließen
- Netzanschluss anbringen

ACHTUNG: Gerät immer angesteckt lassen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

1. Zusammenbau

- Netzstecker am Gerät anschließen
- Netzanschluss anbringen

ACHTUNG: Gerät immer angesteckt lassen




Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

1. Zusammenbau

ACHTUNG:

- Sauerstoffadapter an der Seite des Gerätes anbringen - wenn Sauerstoff verabreicht wird

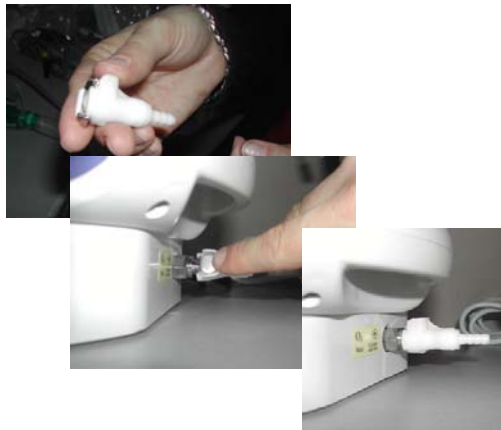


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

ACHTUNG:

- Sauerstoffschlauch an den Adapter anbringen und mit dem Sauerstoffgerät verbinden
- Sauerstoff aufdrehen nicht vergessen

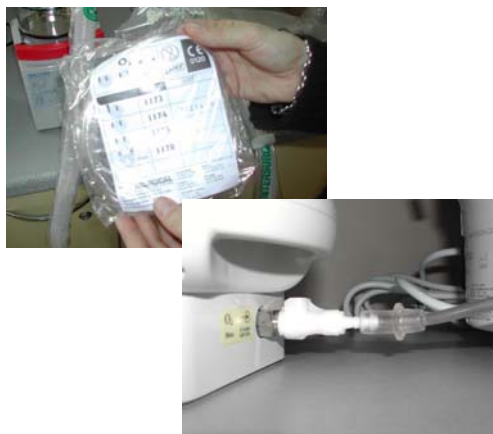


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2.Heizung

- Temperatur anzeige
- Alarm löschen
- Wahl taste Maske bzw. Tracheotomie
- Kontrollleuchten
- Ein/Aus Schalter

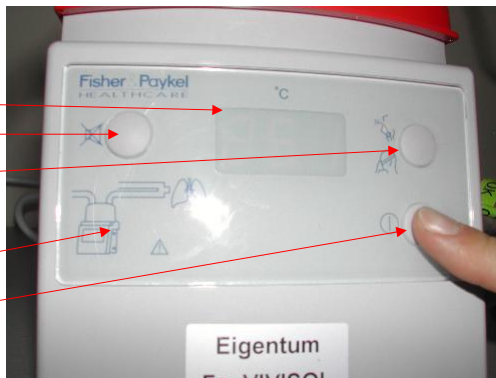

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2. Heizung

- Heizung ans Netz stecken
- Wasserbehälter aufsetzen und einrasten lassen
- Behälter mit Wasser bis zur schwarzen Markierungslinie befüllen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2. Heizung

- Heizung ans Netz stecken
- Wasserbehälter aufsetzen und einrasten lassen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2. Heizung

- Heizung ans Netz stecken
- Wasserbehälter aufsetzen und einrasten lassen
- Behälter mit Wasser bis zur schwarzen Markierungslinie befüllen



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2. Heizung

- Heizung ans Netz stecken
- Wasserbehälter aufsetzen und einrasten lassen
- **Behälter mit Wasser bis zur schwarzen Markierungslinie befüllen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

2. Heizung

- Heizung ans Netz stecken
- Wasserbehälter aufsetzen und einrasten lassen
- **Behälter mit Wasser bis zur schwarzen Markierungslinie befüllen**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

3. Schlauchsystem-Zusammenbau

Einmalschlauchsystem anschließen.

- Kurzer Schlauch vom Beatmungsgerät zur Heizung
- Langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

3. Schlauchsystem-Zusammenbau

- Kurzer Schlauch vom Beatmungsgerät zur Heizung
- Langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

**3. Schlauchsystem
 Zusammenbau**

- Einmalschlauch-system anschließen
- Kurzer Schlauch vom Beatmungsgerät zur Heizung
- **Langer Beatmungsschlauch von der Heizung zum Patienten**



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

**4. Druckschläuche
 anbringen**

Achtung:

- Achten Sie darauf dass der Exhalation-Druckanschluss stets gut befestigt ist.



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

4. Druckschläuche anbringen

- Ansatz vom Pressure-Schlauch abschneiden und am Druckanschluss anbringen.
- Exhalation Druckschlauch an Adapter anschrauben



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

4. Druckschläuche anbringen

- Ansatz vom Pressure-Schlauch abschneiden und am Druckanschluss anbringen.
- Exhalation Druckschlauch an Adapter anschrauben



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

4. Druckschläuche anbringen

- Ansatz vom Pressure-Schlauch abschneiden und am Druckanschluss anbringen.
- Exhalation Druckschlauch an Adapter anschrauben



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

4. Druckschläuche anbringen

- Ansatz vom Pressure-Schlauch abschneiden und am Druckanschluss anbringen.
- Exhalation Druckschlauch an Adapter anschrauben



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

5. Zusammenbau des Heizsystems

- Anbringen des Heizdraht-Kabels
- Anbringen des Temperatursonden-Kabels

Achtung: farbliche Kennzeichnung!



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

5. Zusammenbau des Heizsystems

- Verbinden Sie den Heizdraht des Schlauchsystems mit dem Kabel der Heizung



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

5. Zusammenbau des Heizsystems

- Anbringen des Heizdraht-Kabels
- Anbringen des Temperatursonden-Kabels

Achtung: farbliche Kennzeichnung!



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

5. Zusammenbau des Heizsystems

- Stecken sie die Anschlüsse der Temperatursonde in die dafür vorhergesehenen Adapter des Schlauchsystems




am Heizungstopf

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

5. Zusammenbau des Heizsystems

- Stecken sie die Anschlüsse der Temperatursonde in die dafür vorhergesehenen Adapter des Schlauchsystems

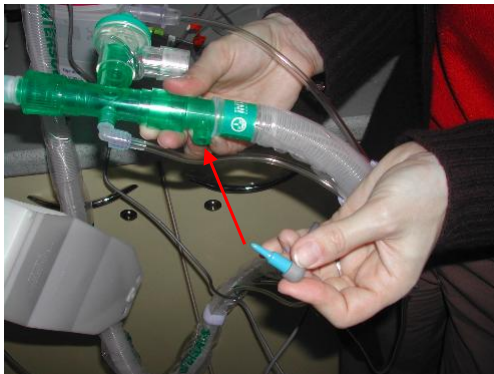

am Schlauchsystem





Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						



Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung

- Ihr Beatmungsgerät ist nun einsatzbereit



Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

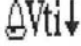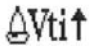Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
 BP	Pat. ist nicht bzw. nicht korrekt angeschlossen. Schlauchsystem ist defekt	Pat. anschließen, alle Schläuche überprüfen Schlauchsystem wechseln				
 HP	Wasser im Schlauchsystem Pat verschleimt Kanüle verstopft Pat. hustet Schlauchsystem ist geknickt	Wasserfalle entleeren absaugen Kanüle wechseln Alarm erlischt nach dem Husten absuchen des Schlauchsystems				
 Vti↓	Kanüle ist verstopft Schlauchsystem ist geknickt oder undicht	absaugen evtl. Kanüle wechseln Schlauchsystem überprüfen				
 Vtit	Pat. atmet sehr tief ein Schlauchsystem ist von der Kanüle getrennt Kanüle ist herausgerutscht Pat ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Alarm erlischt automatisch Schlauchsystem wieder anschließen Kanüle wieder hineingeben oder wechseln Pat. anschließen, System prüfen				
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

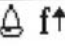Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung						
ALARM	URSACHE	BEHEBUNG				
 f↑	Pat atmet zu schnell (Angst , Aufregung)	beruhigen, absaugen Wenn die Symptome weiter bestehen, verständigen sie das Krankenhaus				
	Interne Batterie ausgefallen oder entladen Ladezustand < 5%	Schließen sie das Gerät umgehend an die Netzspannung an um die interne Batterie wieder aufzuladen. Bleibt der Alarm weiter bestehen fordern sie sofort den technischen Service der Firma VIVISOL an.				
<p>Weitere Alarmfunktionen entnehmen Sie bitte Ihrem beigelegtem Patientenhandbuch.</p> <p>Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich an die Firma VIVISOL.</p>						
Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Beatmungsgerät „VS-Ultra“ - Einschlauch & Heizung
Wurde auf diese Pflegetätigkeiten eingeschult:
Unterschrift:.....
(Name in Blockschrift)
erfolgreicher Abschluss der Einschulung:
Unterschrift Sr/Pfl.:.....
(Name in Blockschrift)